

M x A 蛋白測定用 検体調製および送付手順書



安定化剤チューブには専用安定化剤0.45mLが入っています。
測定値に影響しますので、液をこぼさないようご注意ください。

- ①安定化剤チューブのラベルに、油性インクで検体番号をご記入ください。または、ラベルに印字されている番号を「分析検体明細書」の検体番号の欄にご記入ください。
- ②必ずEDTAを含む採血管で採血してください。
- ③分注前に採血管を軽く転倒混和し、
全血0.05mLを安定化剤チューブに添加してください。
これで全血10倍希釈試料になります。
- ④チューブの蓋をしっかり締めて、ボルテックスミキサー等でよく混合してください。
- ⑤混合後、速やかに凍結してください。
※採血から安定化剤添加までの時間をできるだけ短くしてください。
安定化剤添加後、凍結保存で3ヶ月安定です。
- ⑥輸送中の漏れ防止のために、ビニール袋に入れてください。
- ⑦ホームページから「分析試験依頼書」と「分析検体明細書」をダウンロードまたは印刷し、必要事項をご記入ください。
- ⑧検体と「分析試験依頼書」と「分析検体明細書」を同封し、必ず冷凍便で当センター宛にお送りください。




宛先

〒411-0932
静岡県駿東郡長泉町南一色600-1
協和メデックス株式会社 富士工場内
KMアッセイセンター 草田
TEL 055-988-8222

同封した宅配伝票もお使いいただけます。

宅配伝票の品名には、「M x A」とご記入ください。

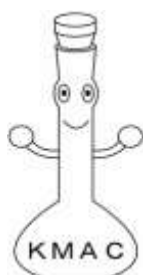

この手順書は予告なく改訂する場合があります。